


نحوه استفاده از دماسنج پیشانی


به عنوان دماسنج بدن

۱. ابتدا دکمه ON/OFF را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.

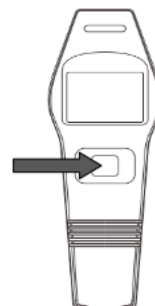

۲. برای انتخاب نمایه بدن دکمه Mode را بفشارید.

عدد اندازه گیری فلش می زند.

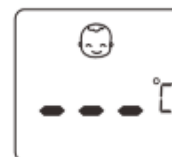

۳. نوک دماسنج را نزدیک پیشانی ببرید.

مطمئن شوید نوک دماسنج صاف و نزدیک پیشانی است و زاویه ای ندارد. اندازه گیری دما را در فاصله ۲ سانتی متری متری انجام دهید. اندازه گیر به صورت خودکار دما را محاسبه خواهد کرد و نور آبی چشمک می زند.



۴. نتیجه را بخوانید.

دما در ۳ ثانیه اندازه گیری خواهد شد.

عدد سنجش دما با نور سبز و سه بوق کوتاه همزمان نشان داده می شود.




نکته:

- به عنوان دماسنج بدن، دما ممکن است با عرق، چربی و محیط تحت تاثیر قرار گیرد. دمای اندازه گیری باید فقط به عنوان مرجع قرار گرفته شود.

- اگر نوک دماسنج به صورت زاویه دار نزدیک پیشانی قرار گیرد، دمای اندازه گیری تحت تاثیر محیط قرار می گیرد. پوست کودکان سریع به دمای محیط واکنش نشان می دهد. بنابراین در حین شیردهی یا بعد از آن از دماسنج استفاده نکنید زیرا دمای پوست ممکن است کمتر از دمای داخلی بدن باشد.
- اگر سنجش دما 32°C (89.6°F) باشد، نمایشگر نور قرمز را همزمان با سه بوق کوتاه نشان خواهد داد.
- اگر سنجش دما 37.5°C (99.5°F) و 43°C (109.4°F) باشد، نمایشگر نور قرمز را همزمان با ۱۰ بوق کوتاه نشان خواهد داد.
- دماسنج به صورت خودکار بعد از یک دقیقه بی استفاده ماندن خاموش خواهد شد.


به عنوان دماسنج اشیا

۱. ابتدا دکمه ON/OFF را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.

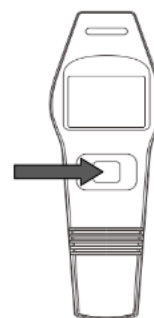

۲. برای انتخاب نمایه بدن دکمه Mode را بفشارید.

عدد اندازه گیری فلش می زند.

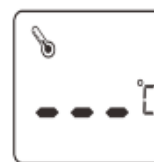

۳. نوک دماسنج را نزدیک شی ببرید.

مطمئن شوید نوک دماسنج صاف و نزدیک شی است و زاویه ای ندارد. اندازه گیری دما را در فاصله ۲ سانتی متری انجام دهید. اندازه گیر به صورت خودکار دما را محاسبه خواهد کرد و نور آبی چشمک می زند.



۴. نتیجه را بخوانید.

دما در ۳ ثانیه اندازه گیری خواهد شد.

عدد دما با نور سبز و سه بوق کوتاه همزمان نشان داده می شود.



